

SoUp

RELOADED

SO-UP onderhoud



De apparaten mogen alleen worden onderhouden en gerepareerd door het personeel dat in dienst is bij Maya Beauty Engineering.

Gebruik alleen originele Maya Beauty Engineering onderdelen bij het onderhoud van het apparaat, anders kunnen er storingen ontstaan

Haal altijd het netsnoer uit het stopcontact voordat u het apparaat opent om een elektrische schok te voorkomen.

De onderdelen mogen alleen geopend worden door geautoriseerd personeel om incorrecte onderhoud te voorkomen.

Regulier onderhoud

1. Elke 6 maanden dient het vacuüm filter vervangen te worden (deze bevindt zich aan de achterkant van het apparaat)
2. Elke 6 maanden dient het vacuüm filter van het body-handvat 2.1 en het gelaat-handvat 2.2 vervangen te worden.
3. Elke 12 maanden dient het rubbertje van het gelaat-handvat vervangen te worden.
4. Elke 12 maanden dient het rubbertje van het body-handvat vervangen te worden.
5. Elke 12 maanden dient de werking van de Ultrasound functie gecontroleerd te worden (alleen de onderdelen voor het lichaam)
6. Elke 12 maanden dient de werking van de radiofrequentie functie gecontroleerd te worden. (alleen met een oscilloscoop of personeel van Maya Beauty Engineering)
7. Elke 12 maanden dient er een interne inspectie en reiniging plaats te vinden.

Standaard onderhoud kit – te bestellen bij French House Cosmetics

- C0773 - Vacuüm filter achterkant apparaat. 1 stuk
- C0772 - Rubberen ring van gelaat-handvat voor lymfedrainage. 2 stuks
- C0591 - Rubberen ring van gelaat-handvat voor bindweefselmassage. 1 stuk
- C0771 - Rubberen ring van body-handvat voor bindweefselmassage. 2 stuks
- C0451 - Kleine rubberen ring van body-handvat voor lymfedrainage. 1 stuk
- C0729 - Grote rubberen ring van body-handvat voor bindweefselmassage. 1 stuk


Losse onderhoud delen – te bestellen bij French House Cosmetics

- J0061 - Vacuüm filter van body-handvat voor bindweefselmassage en lymfedrainage.
- J0060 – Vacuüm filter van gelaat-handvat voor bindweefselmassage en lymfedrainage.


1. Vervangen vacuüm filter C0773

Maak het vacuüm filter (C0773) elke 30 dagen schoon als het vuil is.

Vervang het vacuüm filter (C0773) elke 6 maanden.

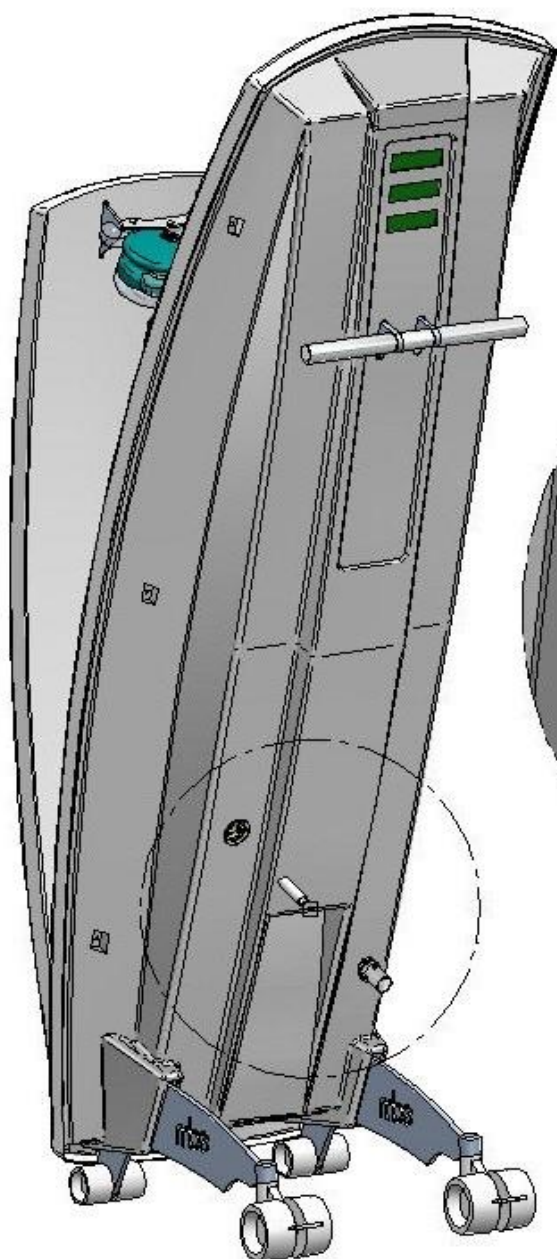


Bij vervanging of schoonmaken van het
vacuüm filter C0773

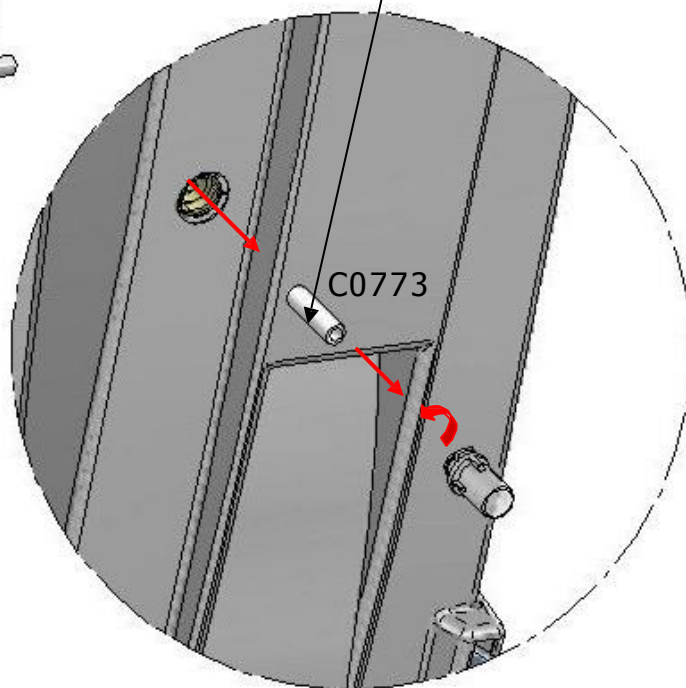

2.1 Vervangen vacuüm filter J0061 voor body-handvat

Vervang het vacuüm filter (J0061) na 5 behandelingen.


Maak het kopstuk na iedere behandeling goed schoon.

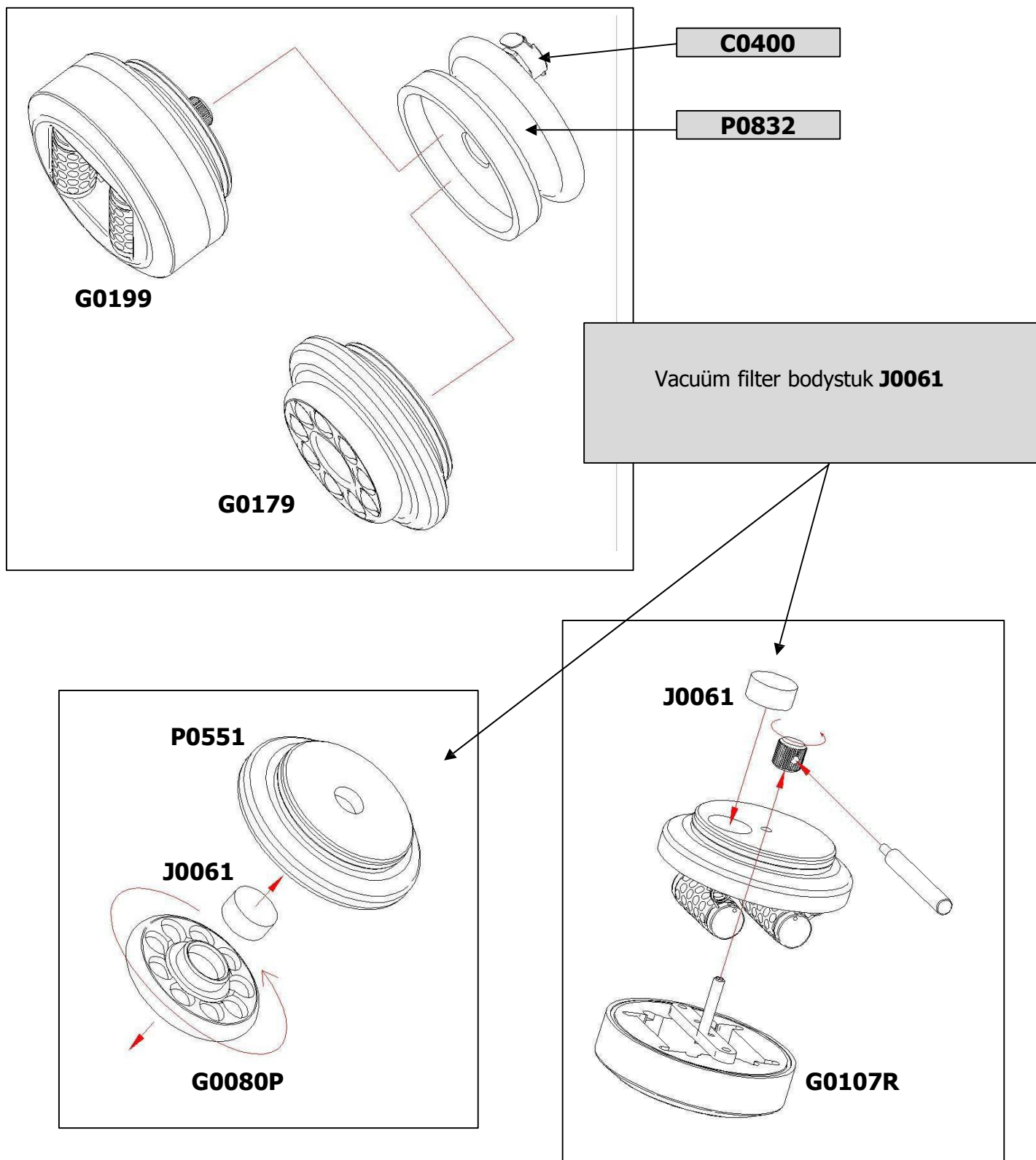

2.2 Vervangen vacuüm filter J0060 voor gelaat-handvat

Vervang het vacuüm filter (J0060) na 5 behandelingen.

Maak het kopstuk na iedere behandeling goed schoon.

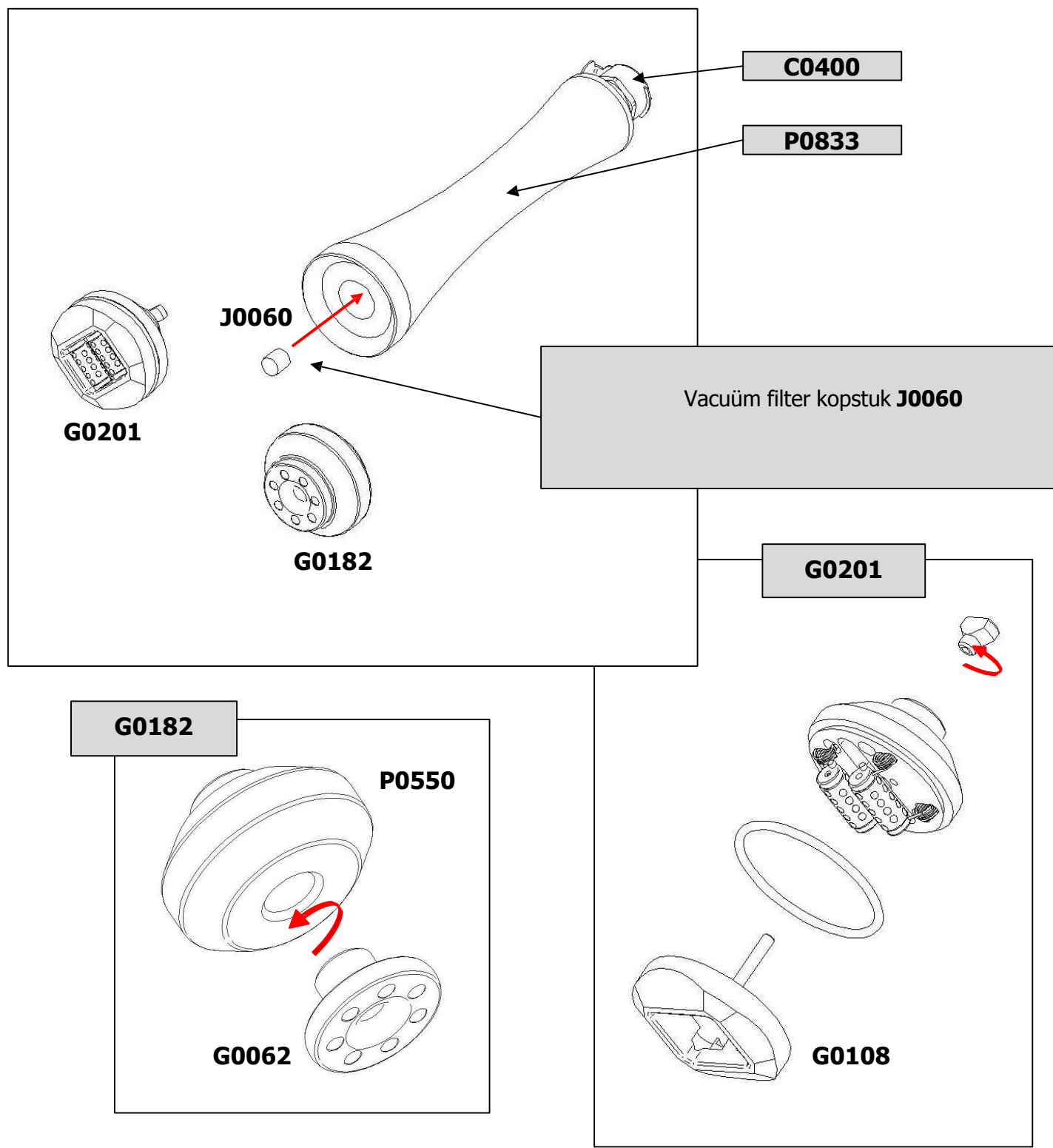

3. Vervangen rubberen ring C0772 en C0591 van gelaat-handvat

Vervanging van de kleine rubberen ring van het gelaat-handvat voor bindweefselmassage (A) **C0772**




A



B






Vervanging van de rubberen ring van het gelaat-handvat voor bindweefselmassage (B) **C0591**

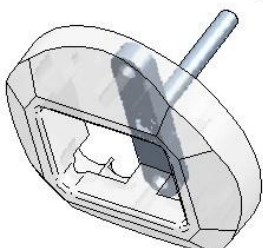


Vervanging van de kleine rubberen ring van het gelaat-handvat voor lymfedrainage (A) **C0772**

A

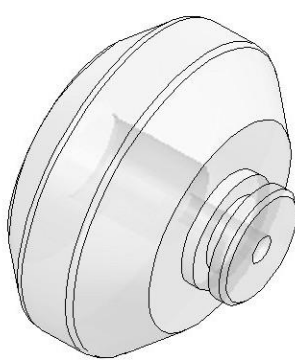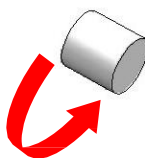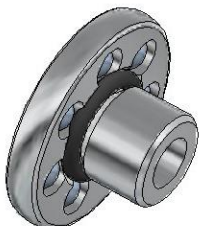

4. Vervangen rubberen ring C0771 en C0729 van body-handvat

Vervanging van de rubberen ring van het body-handvat voor bindweefselmassage (A) **C0771**

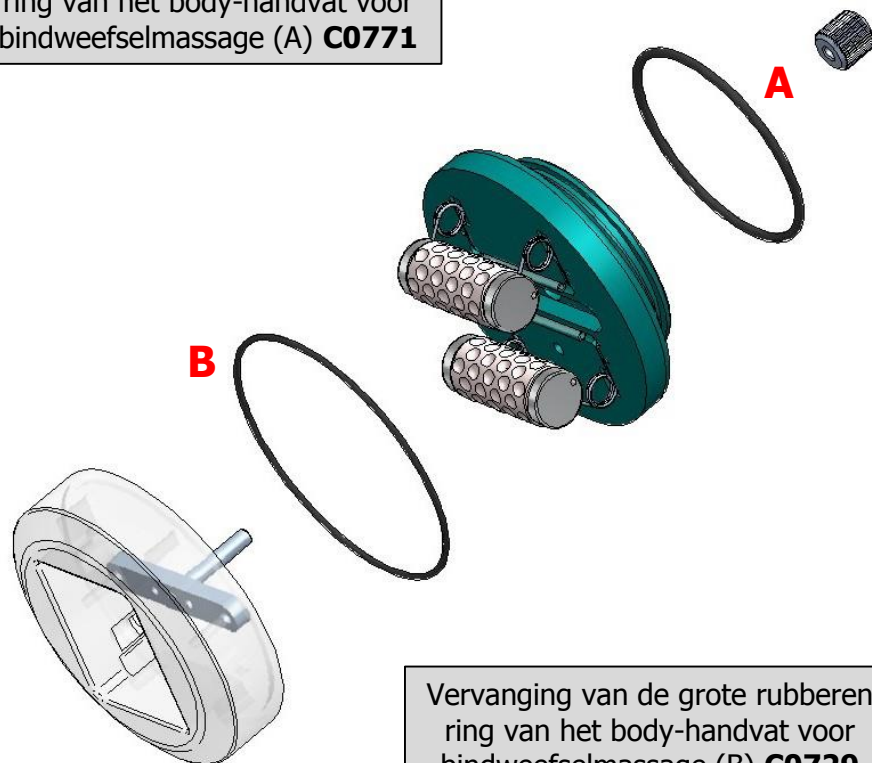

Vervanging van de grote rubberen ring van het body-handvat voor bindweefselmassage (B) **C0729**

Vervanging van de rubberen ring van het body-handvat voor lymfedrainage (A) **C0771**




Vervanging van de kleine rubberen ring van het body-handvat voor Lymfedrainage (B) **C0451**


5. Controle van de Ultrasound functie

Ultrasound – yellow Photodynamics

Ultra Sound uitgeschakeld – stilstaand water

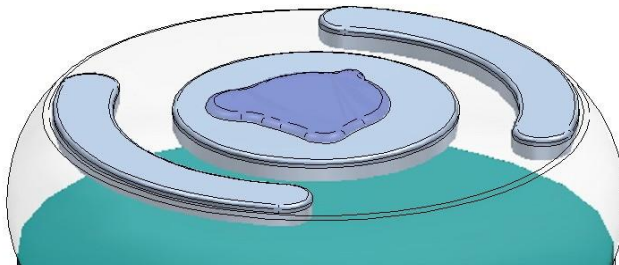

Ultra Sound ingeschakeld – golvend water

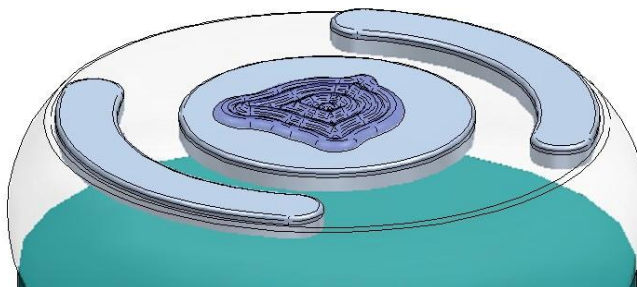

Controleren van de werking van de Ultra
Sound (alleen de body onderdelen)

7. Controle van de Radiofrequentie functie

Radiofrequentie – red or blue Photodynamics

